

Cutimed® Sorbact®

Die Nr. 1 der Wundverbände im Infektionsmanagement*



100 %
physikalisch
wirksam

0 %
Silber

Cutimed®

Cutimed® Sorbact® – Die erste Wahl bei infizierten Wunden

Erleben Sie das einzigartige **Cutimed® Sorbact®** – die Nr. 1 der Wundverbände im Infektionsmanagement*, die ohne chemische Zusätze wirkt und dabei mit nachgewiesener Wirksamkeit überzeugt.



100 %
patientenfreundlich

0 %
bekannte
Kontraindikationen

*Bezogen auf Apothekenumsätze; Insight Health Galaxy Datenbank für Apothekenmarktdaten, Marktsegment Antimikrobielle Wundverbände: NCI D04B4 (Suprasorb P+PHMB), D04B8 (Cutimed® Sorbact®, Dracofoam Infekt), D04B7 (Silberhaltige Wundauflagen), Stand 04/2020

Infektionen vorbeugen und managen




100 %
die richtige Wahl
mit
Cutimed® Sorbact®


- ◆ **einzigartig**
mit physikalischem Sorbact®-Wirkprinzip
- ◆ **erstattungsfähig**
in der Verordnung
- ◆ **einsatzbereit**
bei sauberen, kolonisierten oder infizierten Wunden unterschiedlichster Genese

Physikalisch, einzigartig: Das Sorbact®-Wirkprinzip


Cutimed® Sorbact® nutzt die sichere und effektive Sorbact®-Technologie. Durch die rein physikalische Wirkweise werden Bakterien und Pilze entfernt, ohne zusätzliche Endotoxine freizusetzen.¹

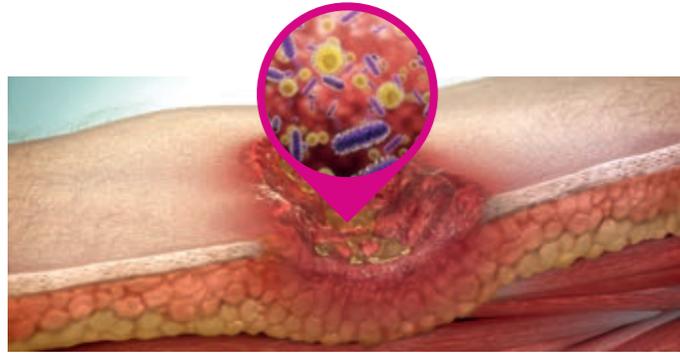

1. Eine **infizierte, kolonisierte** Wunde.

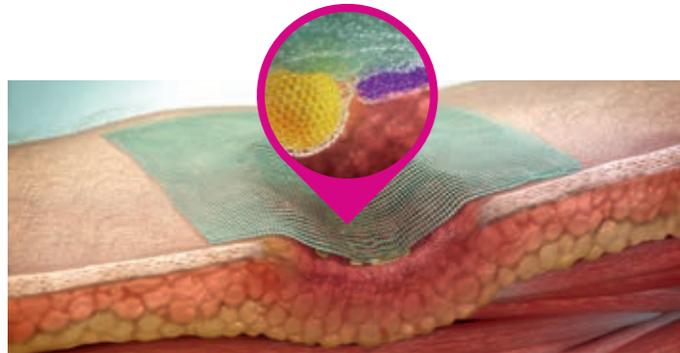

2. **Cutimed® Sorbact®** wird direkt auf die Wunde appliziert. Bakterien und/oder Pilze binden sich an das **Sorbact®-Gewebe**.

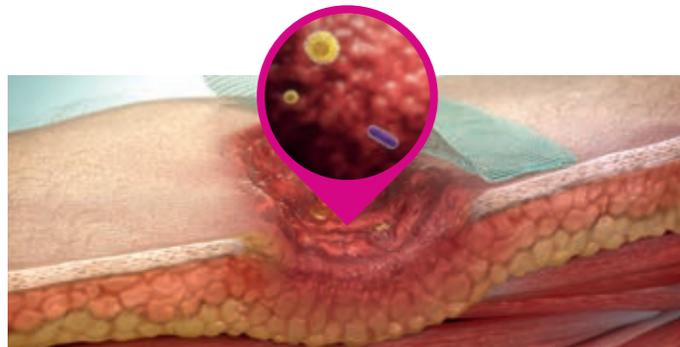

3. **Mit jedem Verbandwechsel** werden die gebundenen Krankheitserreger aus der Wunde entfernt.

Keime binden und entfernen



bekanntes Risiko in der Anwendung*

bekannte Kontraindikationen

bekannte Mechanismen zur Resistenzbildung



* Bitte beachten Sie die Warn- und Vorsichtshinweise aus der Gebrauchsanweisung von Cutimed® Sorbact® Gel.
¹ Wie in vitro gezeigt: Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.



**100 %
Vertrauen
0 %
bekannte
Kontraindikationen**

Cutimed® Sorbact® ist aufgrund seines schonenden Wirkprinzips auch geeignet für:



Kinder und Säuglinge*



Schwangere und Stillende*



Präventiv bei Risikopatienten*



Langzeitbehandlung

Anwendungsgebiete

Cutimed® Sorbact® kann bei jeder Art von sauberen, kontaminierten, kolonisierten oder infizierten Wunden unterschiedlichster Genese eingesetzt werden, wie z. B.:



Chronische Wunden (z. B. venöse, arterielle oder diabetische Ulzera sowie Druckgeschwüre)



Wunden nach Exzision von Fisteln und Abszessen



Postoperative Wunden und Wunddehiszenzen



Diabetisches Fußsyndrom



Traumatische Wunden



Hautpilzinfektionen

* Bitte beachten Sie die Warn- und Vorsichtshinweise aus der Gebrauchsanweisung von Cutimed® Sorbact® Gel.

Schnelle Wirkung – bindet Bakterien in 30 Sekunden

Als infiziert gelten Wunden mit einer Keimzahl von 10^5 pro Gramm Gewebe. In vitro bindet ein Quadratzentimeter **Cutimed® Sorbact®** Mikroben in nur 30 Sekunden. Nur zwei Stunden später hat sich die Zahl der gebundenen MRSA Mikroben um 50 % gesteigert, bei *Pseudomonas aeruginosa* mehr als verdoppelt.²

- Bindung von mehr als 10^8 Bakterien in nur 30 Sekunden.²
- Wirksam bei Bakterien (MRSA, VRE, u. a.) und Pilzen.³



0 %
Wirkverzögerung
100 %
überzeugend

²Rosana et al. Microbiology aspect of wound infection: In-vitro test for efficacy of hydrophobic dressing in microorganism binding. Med J Indones 2009;18:155-60
³Ljungh et al. Using the principle of hydrophobic interaction to bind and remove wound bacteria. J Wound Care. 2006 Apr;15(4):175-80.

Überzeugend in der Praxis

Fallstudie zur Wirksamkeit

Diagnose und Anamnese

- Männlicher, 74-jähriger Patient mit der Diagnose Diabetes mell. Typ IIb und pAVK IV.
- Zusätzlicher Verschluss der A. poplitea aufgrund von starker Durchblutungsstörung mit anschließender, erfolgloser Prostavasin-Therapie.
- Eine mögliche Unterschenkelamputation wurde vom Patienten abgelehnt.

Wundbehandlung

Zu Beginn bestanden 2 teilweise debridierte Ulzerationen unterhalb der 5. Zehe und über dem Mittelfußknochen.



Beginn Wundtherapie mit Cutimed® Sorbact®, Wundabdeckung mit Cutimed® Siltec® Plus.



14. Tag: Verbandwechsel alle 2 Tage bis zur Eliminierung der Infektionsanzeichen.



35. Tag: Behebung der Infektion neben kontinuierlichem Heilungsverlauf.



93. Tag: Therapie mit Cutimed® Sorbact®, Cutimed® Siltec® L und Cutimed® Sorbact® Gel (zur Vermeidung einer Sekundärinfektion).



124. Tag: Verbandwechsel alle 4 Tage.




140. Tag: Wundverschluss.

Cutimed® Sorbact® überzeugt durch nachgewiesene Wirksamkeit

Eine randomisierte, vergleichende, Single-Center-Studie mit 40 Patienten mit Beinulcerationen ergab: **Cutimed® Sorbact®** reduziert die bakterielle Belastung in kritisch kolonisierten Wunden effektiver als Aquacel Ag.⁴

■ Cutimed® Sorbact® ■ Aquacel Ag

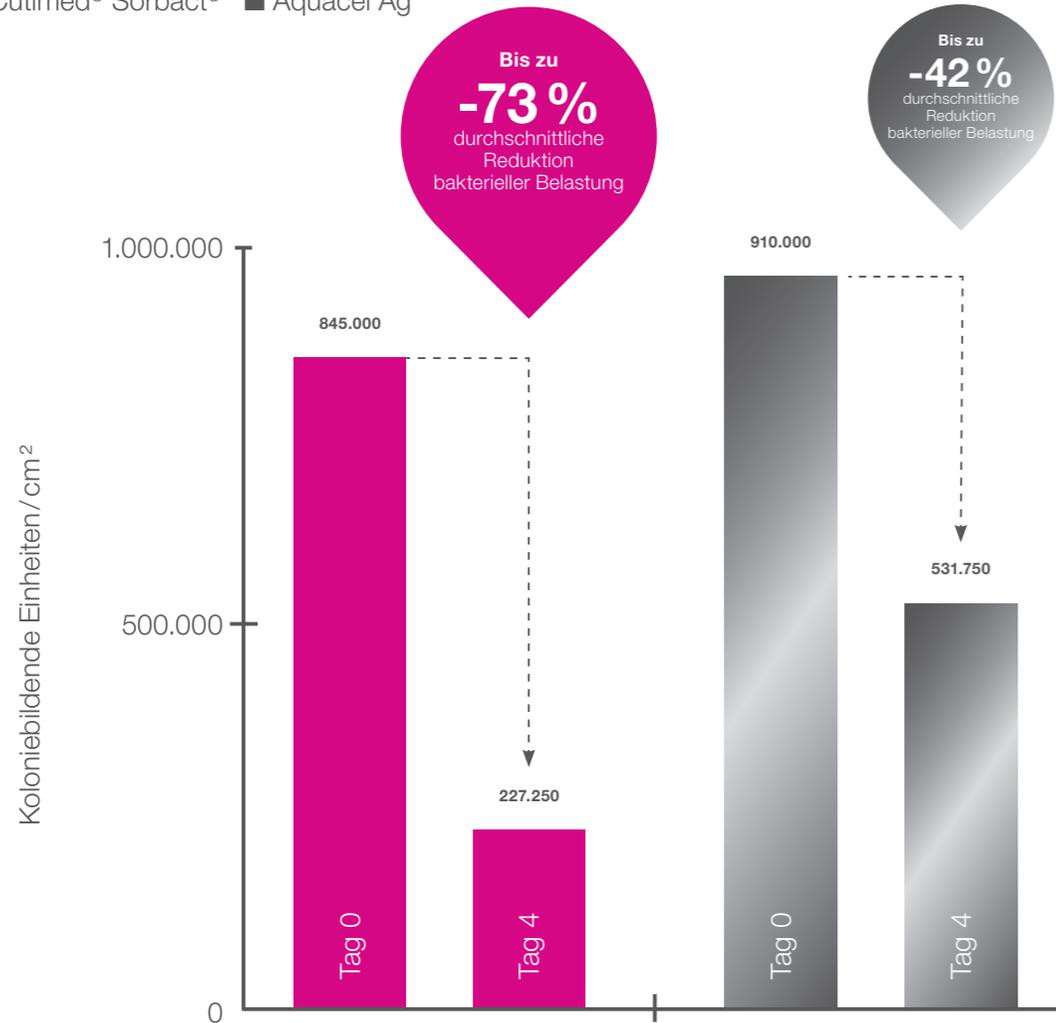

Cutimed® Sorbact® – Die Vorteile auf einen Blick

100%

physikalisch wirksam

- Rein physikalisches Wirkprinzip

verträgliche Eigenschaften

- Keine zusätzlichen Endotoxine werden freigesetzt⁵
- Keine Freisetzung von antimikrobiellen Substanzen
- Keine bekannten Mechanismen zur Resistenzbildung

patientenfreundlich

- Kein Risiko einer zusätzlichen Entzündung oder Heilungsverzögerung⁶
- Sicher in der Anwendung für schwangere und stillende Frauen*
- Geeignet für Langzeitbehandlungen**

⁴Ovington L. Bacterial toxins and wound healing. *Ostomy Wound Manage.* 2003 Jul; 49(7A Suppl):8–12. Review.
⁵Bitte beachten Sie die Warn- und Vorsichtshinweise aus der Gebrauchsanweisung von Cutimed® Sorbact® Gel.
⁶Verbandwechsel während der Langzeitbehandlung sollten die patientenspezifische Situation berücksichtigen und vom behandelnden Arzt entschieden werden.




⁴Mosti et al., "Comparative study of two antimicrobial dressings in infected leg ulcers: a pilot study", *Journal of Wound Care*, 2015 Mar;24(3):121-2; 124-7
⁵As shown in vitro; Susilo YB, Husmark J, DACC Coated Wound Dressing and Endotoxin: Investigation on Binding Ability and Effect on Endotoxin Release from Gram-negative Bacteria. Poster presented at EWMA 2019.

100% gut aufgestellt – Alle Cutimed® Sorbact®-Produkte im Überblick

Exsudatlevel

Unsere Kombinationsprodukte vereinen die effiziente Sorbact®-Technologie mit dem Exsudatmanagement für schwach, mittel und stark exsudierende/ oberflächliche Wunden.

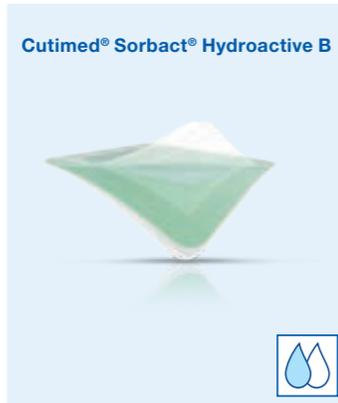

Wundtiefe

Für unsere Basisprodukte ist eine Sekundärabdeckung erforderlich.




* Mit Hydrogel imprägnierte antimikrobielle Komresse, die das autolytische Débridement in belegten oder teilweise nekrotischen Wunden fördert.

Cutimed® Sorbact® Hydroactive B – Die 3-in-1-Lösung




Exsudatmanagement für schwach exsudierende Wunden

Ihr besonderer Vorteil: 3-in-1 Lösung vereint Wundreinigung, Exsudat- und Infektionsmanagement.

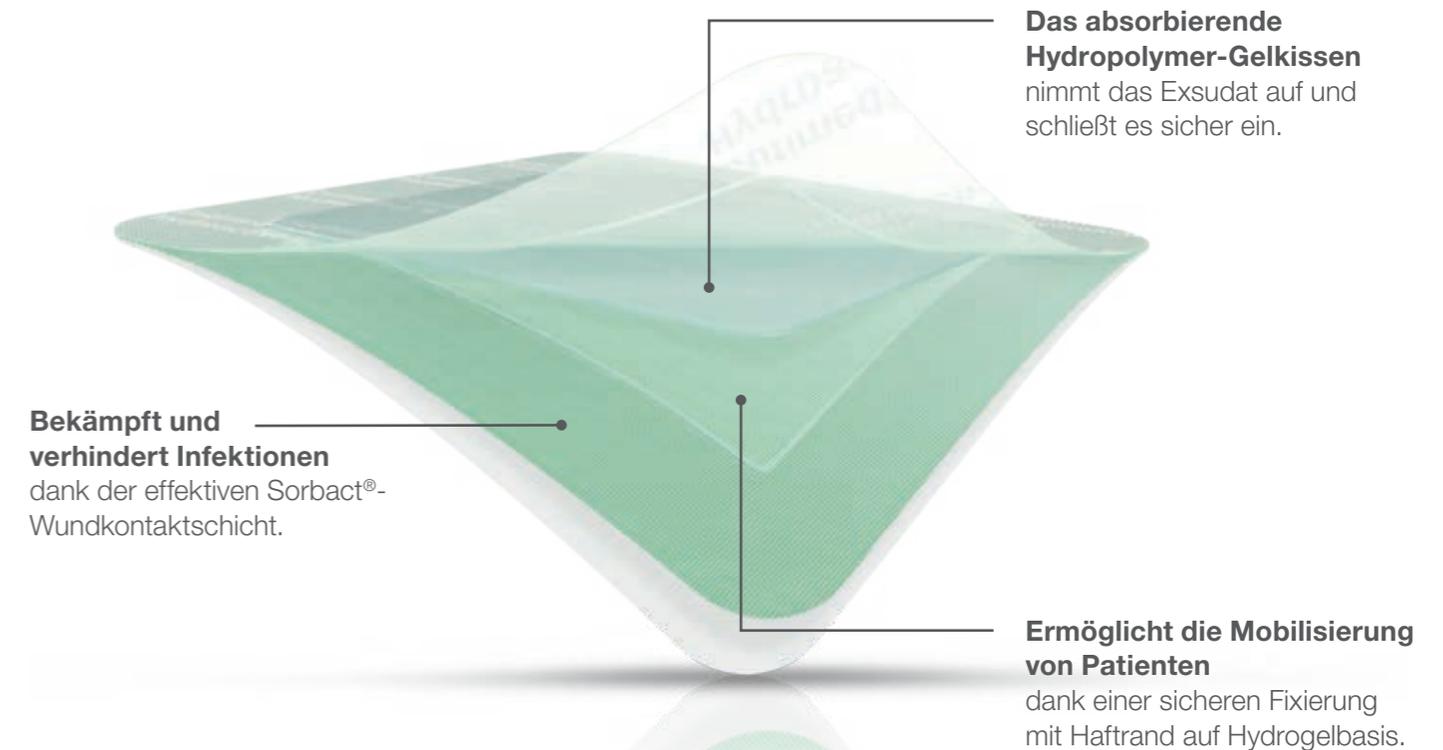

Cutimed® Siltec® Sorbact® – Der Allround-Schaumverband

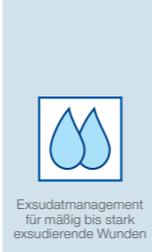

Ihr besonderer Vorteil: Infektionskontrolle und Exsudatmanagement in einem modernen Schaumverband.

Hohe Absorptionskapazität
dank der Superabsorber-Technologie

Ideale Heilungsbedingungen
durch die feuchtigkeitsregulierende, hochatmungsaktive Deckfolie

Schützt die Wundränder
aufgrund der vertikalen Absorption durch den offporigen Polyurethanschaum

Sanfte und sichere Fixierung
atraumatischer und schmerzreduzierter Verbandwechsel

Bekämpft und verhindert Infektionen
dank der effektiven Sorbact®-Wundkontaktschicht

Cutimed® Sorbion® Sorbact® – Der starke Superabsorber



Ihr besonderer Vorteil: Superabsorbierender Kern zeigt bis zu **50 % erhöhte Absorptionskapazität*** im Vergleich zu herkömmlichen superabsorbierenden Wundauflagen.

Mehr Patientenkomfort
dank der Deckschicht, die das Austreten von Exsudat verhindert

Hervorragendes Exsudatmanagement
durch den superabsorbierenden Kern, auch unter Druck

Schnelle Exsudataufnahme und -verteilung
mittels des multifunktionalen Verteilervlies. Sicherer Exsudateinschluss – auch unter Kompression

Bekämpft und verhindert Infektionen
dank der effektiven Sorbact®-Wundkontaktschicht

*Im Vergleich zu anderen superabsorbierenden Wundauflagen – Data on file.

Cutimed® Sorbact® Bestellübersicht

PZN für
das Rezept

Kombinationsprodukte		Wundpadgröße	Größe	Inhalt	BE/VE	Best.-Nr.	PZN*
	Cutimed® Sorbact® Hydroactive B (Border) Absorbierende, keimreduzierende Wundauflage mit Hafrand; unterstützt das autolytische Débridement 	5 x 6,5cm	7 x 8,5cm	12 Stück	1/10	7993310	07352452
		10 x 10cm	14 x 14cm	12 Stück	1/10	7993311	07352682
		15 x 15cm	19 x 19cm	12 Stück	1/10	7993312	07353380
		10 x 20cm	14 x 24cm	12 Stück	1/10	7993313	07353428
	Cutimed® Siltec® Sorbact® Hochabsorbierender, keimreduzierender Schaumverband mit Silikon-Hafrand 	4 x 4cm	7,5 x 7,5cm	12 Stück	1/10	7325107	07342672
		6 x 6cm	10 x 10cm	12 Stück	1/10	7325117	13574412
		8,2 x 8,2cm	12,5 x 12,5cm	12 Stück	1/10	7325108	07342689
		10 x 10cm	15 x 15cm	12 Stück	1/10	7325109	07343140
		5 x 16,5cm	10 x 22,5cm	12 Stück	1/10	7325115	13574398
		12,3 x 12,3cm	17,5 x 17,5cm	6 Stück	1/10	7325110	07343157
		16,5 x 16,5cm	22,5 x 22,5cm	6 Stück	1/10	7325111	07343223
	Cutimed® Siltec® Sorbact® (Oval) Cutimed® Siltec® Sorbact® (Sacrum)	6 x 3cm	7 x 10cm	12 Stück	1/10	7325119	13574429
		12,5 x 10,6cm	17,5 x 17,5cm	6 Stück	1/10	7325112	07343246
	Cutimed® Sorbion® Sorbact® Superabsorbierender, keimreduzierender Wundverband ohne Hafrand 	16,6 x 14cm	23 x 23cm	6 Stück	1/10	7325113	07343269
		8 x 9cm	10 x 10cm	12 Stück	1/12	7269804	10526387
		7,7 x 17,8cm	10 x 20cm	12 Stück	1/6	7269805	10526393
		17,8 x 17,8cm	20 x 20cm	12 Stück	1/4	7269806	10526401
		17,5 x 27,5cm	20 x 30cm	12 Stück	1/4	7269807	10526418
Basissortiment							PZN*
	Cutimed® Sorbact® Gel Mit Hydrogel imprägnierte keimreduzierende Kompresse 	7,5 x 7,5cm	12 Stück	1/36	7261102	07353434	
		7,5 x 15cm	12 Stück	1/20	7261103	07353440	
		15 x 20cm	6 Stück	1/8	7261115	15637884	
	Cutimed® Sorbact® Saugkompress Mit einer dicken Saugschicht für die zusätzliche Exsudataufnahme 	7 x 9cm	6 Stück	1/16	7216103	07343275	
		7 x 9cm	42 Stück	1/4	7216102	07343281	
		10 x 10cm	6 Stück	1/16	7216203	07343298	
		10 x 10cm	42 Stück	1/2	7216202	07346948	
	Cutimed® Sorbact® Tamponade Für die Anwendung in tiefen Wunden 	10 x 20cm	24 Stück	1/2	7216301	07347161	
		2 x 50cm	12 Stück	1/6	7216607	15657668	
		2 x 50cm	24 Stück	1/6	7216602	07351731	
		5 x 200cm	12 Stück	1/6	7216701	07351808	
	Cutimed® Sorbact® Kompresse Primäre Wundauflage für oberflächliche oder tiefe Wunden 	4 x 6cm	6 Stück	1/24	7216403	07347215	
		4 x 6cm	42 Stück	1/6	7216402	07348031	
		7 x 9cm	6 Stück	1/24	7216503	07348640	
		7 x 9cm	42 Stück	1/6	7216502	07348657	
	Cutimed® Sorbact® Tupfer Zur Reinigung, aber auch Versorgung tiefer Wunden 	walnussgroß	75 Stück (15 x 5)	1/6	7216801	07351814	
	Cutimed® Sorbact® NPWT Wundfüller Keimreduzierender Wundfüller zur Anwendung unter NPWT 	17 x 28cm	42 Stück	1/6	7269300	10272426	
		10 x 100cm	12 Stück	1/6	7269301	10272432	

Cutimed® ist eine eingetragene Marke von BSN Medical GmbH. Sorbact® ist eine eingetragene Marke von ABIGO medical AB. *Alle PZNs gelten nur für Deutschland.